

Français
2022/2023



CATALOGUE
AUDIOLOGIE

#pureScanning

INGÉNIERIE ALLEMANDE | AMOUR DU DÉTAIL | QUALITÉ | PRÉCISION | DURABILITÉ





SMART OPTICS

Vous souhaitez un scanner
audiologie 3D intelligent ?
Arrêtez de chercher ! smart optics a la
bonne solution pour vous.

TABLE DES MATIÈRES

BIENVENUE	3
SMART OPTICS - LA MAISON DES SCANNERS 3D	4
QUALITÉ	5
PRODUITS	6
<i>FREE STAGE</i>	8
<i>MONO SCAN</i>	10
<i>DUO SCAN</i>	12
<i>DS PRODUCTION</i>	14
<i>AURAL SCAN</i>	16
CALIBRATION 3D	18
LE POUVOIR MENTAL	20
PLUS DE SMART OPTICS	22



Suivez-nous : [f](#) [@](#) [t](#) [v](#) / smartopticsDE

BIENVENUE

INGÉNIERIE ALLEMANDE

« Avec nos scanners, nous misons sur la qualité 'Made in Germany'. Tous nos produits d'audiologie sont sans entretien, fiables et à un coût abordable pour les entreprises de n'importe quelle taille. Nous mettons toujours tout en œuvre pour trouver la solution idéale pour nos partenaires et nos clients. Nous sommes fiers de nos propres normes de qualité et, en fin de compte, le « propriétaire satisfait d'aides auditives » est le but central de notre travail. Le faible taux de réparation de nos scanners 3D en est le reflet. C'est pourquoi je suis particulièrement fier de mon équipe, qui fait de smart optics ce qu'elle est : compétente et axée sur ses objectifs ».

Ingénieur diplômé Jörg Friemel, CEO
smart optics Sensortechnik GmbH

SMART OPTICS

LA MAISON DES SCANNERS 3D

FABRICANT DE SCANNERS
3D FIABLES POUR AUDIOLOGIE



OEM

Souhaitez-vous un produit spécialement conçu pour vous sur la base de l'un de nos modèles ? Nous vous le livrons selon vos idées et spécifications.



MADE IN GERMANY

Notre objectif est de toujours produire la meilleure qualité possible et de permettre à nos clients d'avoir des flux de travail les plus efficaces.



GARANTIE DE 36 MOIS

Une panne technique est toujours agaçante. Nous vous aidons rapidement, de manière fiable et compétente.



CERTIFIÉE ISO

La meilleure qualité, garantie. Avec nous, vous savez où vous en êtes car bien sûr, smart optics est certifiée ISO.

Nos produits se sont solidement établis dans l'industrie de l'audiologie en raison de leur performance et de leur qualité. Notre longue expérience et l'échange constant avec nos clients nous aident à développer nos produits de manière orientée vers le client, la qualité et l'avenir. Répondre aux exigences spécifiques des clients et trouver de nouvelles solutions innovantes sont notre défi quotidien et font donc partie de notre compétence principale. Pour nous, la norme ISO EN ISO 13485 n'est pas seulement obligatoire pour la conception et la fabrication de produits médicaux, mais elle fait également partie du standard de qualité de notre société ainsi que de nos promesses à cet égard. L'application volontaire de la norme DIN EN ISO 9001 représente la base de nos actions. Nous sommes convaincus de notre qualité et donc nous offrons une garantie de 36 mois sur tous nos produits.



QUALITÉ

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

Chez smart optics, qualité et service sont toujours conformes aux normes ISO 9001 et 13485.



Système de gestion de la qualité



Système de gestion de la qualité des dispositifs médicaux

PRODUITS

AMOUR DU DÉTAIL

■ FREE STAGE



■ MONO SCAN



Nos produits d'audiologie free Stage, mono Scan, duo Scan et ds Production sont des scanners 3D pour la numérisation des empreintes auriculaires, parfaitement adaptés à vos besoins. En tant que société membre de HIMSA, smart optics a équipé tous les scanners d'une interface avec Noah, ce qui permet d'intégrer le logiciel du scanner dans votre système Noah.

■ DUO SCAN



■ DS PRODUCTION



▪ FREE STAGE



Le free Stage a été développé pour les audiologistes soucieux de la qualité ; il est la solution idéale pour les magasins qui suivent les tendances. Ce scanner indépendant d'un système pour la numérisation d'empreintes auriculaires est facile à configurer à tous les postes de travail et vraiment attire l'attention grâce à son design élégant.

Le design contemporain du scanner 3D combine un look élégant avec une construction robuste. La forme ergonomique du scanner, obtenue en omettant délibérément le couvercle du boîtier, simplifie le flux de travail et permet à l'opérateur d'impressionner ses clients en leur permettant de suivre le processus complet du scannage.

Le capteur tactile innovant permet de lancer la numérisation directement sur le scanner : de cette façon, vous gagnerez un temps précieux. La qualité constante des matériaux utilisés dans la construction est toujours la prémisse la plus importante dans les produits de smart optics.



MESURE	
Précision	< 9 µm NOUVEAU
Temps de numérisation	16 secondes* NOUVEAU (deux empreintes simultanément)
Technologie du capteur	Textures colorées NOUVEAU Bandes de triangulation lumineuses avec LED durable à
Résolution de la qualité de numérisation	variable
Format de sortie	STL, ASCII, MSH et PLY NOUVEAU



CARACTÉRISTIQUES

LOGICIEL

- ✓ Fonction de démarrage rapide
- ✓ Annoter et commenter
- ✓ Différentes méthodes de dénomination
- ✓ Dénomination avec code à barres
*Condition : lecteur de code à barres
- ✓ Calibration 3D *Nécessité des accessoires
- ✓ Numérisation de texture coloré **NOUVEAU**
- ✓ Exportation du projet, y compris le téléchargement FTP



HOUSSE ANTI-POUSSIÈRE



La housse anti-poussière faite à la main est imperméable à l'eau, à la saleté et à l'huile et non-transparente. La présence de fentes parfaitement ajustées pour la connexion d'appareils garantit un ajustement parfait.

INFORMATIONS SUR L'APPAREIL

Taille (L x L x H)	186 × 292 × 348 mm
Poids	6,5 kg
Tension d'alimentation	100- 240 VAC 50/60 Hz
Connexions	1 USB 1 électricité
Capteur tactile	✓
Numérisation ouverte	✓
Garantie	36 mois
Extension de la garantie	12 mois



CONTENU DE LA LIVRAISON

- 1 free Stage
- 2 Porte-objets
- 1 Câble d'alimentation
- 1 Câble USB
- 1 Logiciel de numérisation avec données de calibration

LOGICIEL

Logiciel de numérisation	aural Scan
Compatible avec Noah	✓
Compatible avec iPRO	✓

* Plus temps de matching 3-10 secondes, selon la configuration du PC.

■ MONO SCAN



Avec le mono Scan de smart optics, la génération de données 3D d'empreintes auriculaires est simple et précise. Ce scanner de bureau pratique est la solution de départ pour la numérisation aussi pour les cabinets ORL et pour les petits magasins. mono Scan, qui se distingue par son aspect blanc brillant, est une base particulièrement économique pour réaliser des empreintes auriculaires digitales.

Une seule empreinte auriculaire peut être numérisée en très peu de temps. Les formats des fichiers ouverts standard facilitent la connexion aux centres de production industriels et à votre propre logiciel de CAO.



CARACTÉRISTIQUES

LOGICIEL

- ✓ Fonction de démarrage rapide
- ✓ Annoter et commenter
- ✓ Différentes méthodes de dénomination
- Dénomination avec code à barres
*Condition lecteur de code à barres
- ✓ Calibration 3D *Nécessité des accessoires
- ✓ Numérisation de texture coloré
*disponible en supplément de prix
- ✓ Exportation du projet, y compris le téléchargement FTP



CONTENU DE LA LIVRAISON

- 1 mono Scan
- 1 Porte-objets
- 1 Câble d'alimentation
- 1 Câble USB
- 1 Logiciel de numérisation avec données de calibration

MESURE

Précision	< 9 µm NOUVEAU
Temps de numérisation	15 secondes* NOUVEAU (une empreinte)
Technologie du capteur	Bandes de triangulation lumineuses avec LED durable à haute performance
Résolution de la qualité de numérisation	variable
Format de sortie	STL, ASCII, MSH et PLY NOUVEAU

INFORMATIONS SUR L'APPAREIL

Taille (L× L× H)	300 × 367 × 145 mm
Poids	7,5 kg
Tension d'alimentation	100- 240 VAC 50/60 Hz
Connexions	1 USB 1 électricité
Capteur tactile	—
Numérisation ouverte	—
Garantie	36 mois
Extension de la garantie	12 mois

LOGICIEL

Logiciel de numérisation	aural Scan
Compatible avec Noah	✓
Compatible avec iPRO	✓

* Plus temps de matching 3-10 secondes, selon la configuration du PC.

■ DUO SCAN



Le duo Scan est un scanner 3D fiable pour la numérisation d'empreintes auriculaires, et il a été conçu pour être utilisé quotidiennement dans des cabinets ORL, des magasins et la production. Ce scanner compact et puissant s'intègre parfaitement dans n'importe quel lieu de travail.

Son design sobre et son agréable niveau sonore lors de l'opération sont avantageux lorsqu'il est installé en magasin.

Le temps de numérisation très court assure une haute production quotidienne.



CARACTÉRISTIQUES

LOGICIEL

- ✓ Fonction de démarrage rapide
- ✓ Annoter et commenter
- ✓ Différentes méthodes de dénomination
- ✓ Dénomination avec code à barres
*Condition : lecteur de code à barres
- ✓ Calibration 3D**Nécessité des accessoires
- ✓ Numérisation de texture coloré **NOUVEAU**
- ✓ Exportation du projet, y compris le téléchargement FTP



CONTENU DE LA LIVRAISON

- 1 duo Scan
- 2 Porte-objets
- 1 Câble d'alimentation
- 1 Câble USB
- 1 Logiciel de numérisation avec données de calibration

MESURE

Précision	< 9 µm NOUVEAU
Temps de numérisation	18 secondes* NOUVEAU (deux empreintes simultanément)
Technologie du capteur	Textures colorées NOUVEAU Bandes de triangulation lumineuses avec LED durable à haute
Résolution de la qualité de numérisation	variable
Format de sortie	STL, ASCII, MSH et PLY NOUVEAU

INFORMATIONS SUR L'APPAREIL

Taille (L× L× H)	300 × 340 × 145 mm
Poids	8 kg
Tension d'alimentation	100– 240 VAC 50/60 Hz
Connexions	1 USB 1 électricité
Capteur tactile	—
Numérisation ouverte	—
Garantie	36 mois
Extension de la garantie	 12 mois

LOGICIEL

Logiciel de numérisation	aural Scan
Compatible avec Noah	✓
Compatible avec iPRO	✓

* Plus temps de matching 3-10 secondes, selon la configuration du PC.

■ DS PRODUCTION



Le ds Production se caractérise par un boîtier métallique robuste et l'utilisation de composants optiques et mécaniques de haute qualité. Cela le rend particulièrement adapté à une utilisation continue dans des conditions de production.

Compagnon idéal dans toute chaîne de production, le ds Production se distingue par sa précision et son temps de numérisation très court. Le ds Production gère facilement de grands volumes de production, donc il est prédestiné à une utilisation continue.

Deux porte-objets supplémentaires avec code couleur sont inclus pour un changement rapide des empreintes auriculaires.



CARACTÉRISTIQUES

LOGICIEL

- ✓ Fonction de démarrage rapide
- ✓ Annoter et commenter
- ✓ Différentes méthodes de dénomination
- ✓ Dénomination avec code à barres
*Condition : lecteur de code à barres
- ✓ Calibration 3D*Nécessité des accessoires
- ✓ Numérisation de texture coloré **NOUVEAU**
- ✓ Exportation du projet, y compris le téléchargement FTP



CONTENU DE LA LIVRAISON

- 1 ds Production
- 4 Porte-objets
- 1 Câble d'alimentation
- 1 Câble USB
- 1 Logiciel de numérisation avec données de calibration

MESURE

Précision	< 9 µm NOUVEAU
Temps de numérisation	16 secondes* NOUVEAU (deux empreintes simultanément)
Technologie du capteur	Textures colorées NOUVEAU Bandes de triangulation lumineuses avec LED durable à haute
Résolution de la qualité de numérisation	variable
Format de sortie	STL, ASCII, MSH et PLY NOUVEAU



INFORMATIONS SUR L'APPAREIL

Taille (L x L x H)	300 × 340 × 155 mm
Poids	10 kg
Tension d'alimentation	100- 240 VAC 50/60 Hz
Connexions	1 USB 1 électricité
Capteur tactile	—
Numérisation ouverte	—
Garantie	36 mois
Extension de la garantie	 12 mois

LOGICIEL

Logiciel de numérisation	aural Scan
Compatible avec Noah	✓
Compatible avec iPRO	✓

* Plus temps de matching 3-10 secondes, selon la configuration du PC.

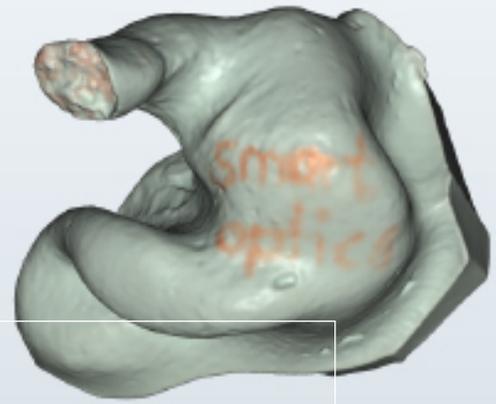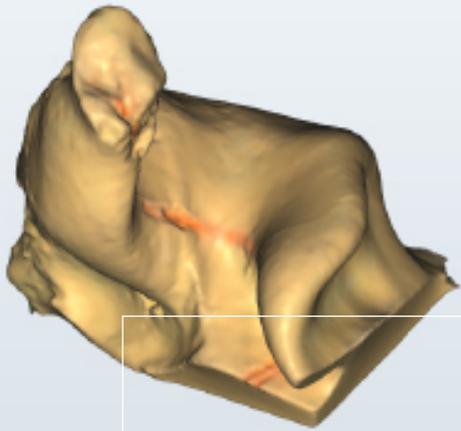

LOGICIEL DE NUMÉRISATION

AURAL SCAN

Précis. Efficient. Parfait pour la gestion de la qualité.

Les scanners d'audiologie 3D de smart optics sont équipés du logiciel de numérisation aural Scan, développé en étroite collaboration avec des audiologistes pour optimiser la numérisation des empreintes auriculaires (individuellement ou par paires) et livrer un flux de travail efficace.

Le début du flux de travail numérique est le scannage.

Le processus démarre directement pour ainsi permettre de travailler très rapidement. Les dénominations peuvent être attribuées à tout moment, automatiquement, manuellement ou éventuellement par code à barres. Le système est flexible et peut être adapté à des spécifications individuelles.

Cela vous semble-t-il familier ?


Le bureau est plein de nouvelles commandes. Vous souhaitez avoir un peu d'ordre. Où se trouve cet outil de découpage ? Les processus de travail intenses et les charges de travail entraînent du stress.

aural Scan est un logiciel fiable et stable pour la vie quotidienne mouvementée, avec une apparence moderne et structurée. L'accent est mis sur la communication et la précision. Avec aural Scan, les empreintes auriculaires peuvent être numérisées rapidement. Les instructions d'utilisation vous guident en toute sécurité à travers toutes les étapes de travail.

Des fonctionnalités utiles qui facilitent le flux de travail et font gagner un temps précieux sont les caractéristiques qui font d'aural Scan le logiciel le plus complet.

Tous les outils logiciels sont clairement organisés et dotés d'icônes attrayantes. La visionneuse 3D a des vues variables des numérisations et des fonctions de correction. Des notes pour la travail peuvent être enregistrées sous forme d'annotations précises et globalement sous forme de commentaires sur le projet.

La fonction d'exportation facilite la communication sur les commandes : Le projet de numérisation terminé peut être enregistré sous forme d'archive ZIP, envoyé par courriel ou téléchargé sur un serveur FTP. Un document PDF configurable résume clairement les données de la commande.

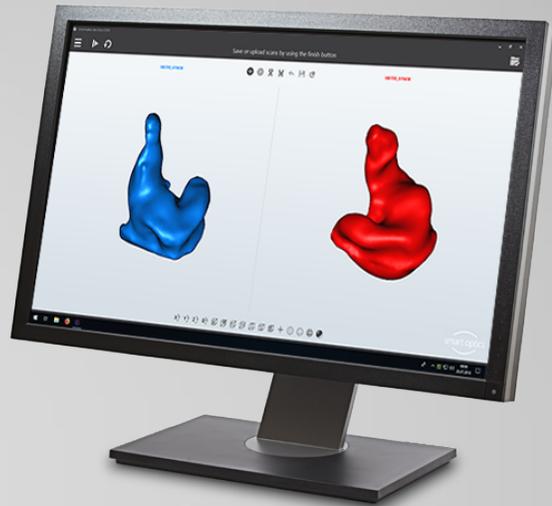

Si vous utilisez Noah de HIMSA, l'interface correspondante permet d'intégrer des postes de travail de scanner dans le paysage du système Noah. Le navigateur des patients Noah est le point de départ pour la numérisation : Sélectionnez tout simplement le patient et démarrez aural Scan. Les postes de travail Noah sans scanner peuvent avoir la possibilité d'utiliser aural Scan pour afficher les scans.

aural Scan peut être adapté à des différents besoins. Entre d'autres, les éléments suivants peuvent être configurés : langue, formats de fichiers (STL, MSH , ASCII et PLY) sauvegarde de fichiers, couleur d'impression, stratégie de numérisation, qualité et découpe automatique. aural Scan peut fonctionner avec des profils d'utilisation individuels.

Toutes les fonctions d'aural Scan mentionnées ci-dessus sont incluses dans la livraison standard (les fonctions de lecture de codes à barres et de rescannage sont exclues pour mono Scan).

Les scanners 3D et le logiciel de smart optics répondent aux normes de qualité les plus élevées. Grâce à la calibration régulière des axes, les scans atteignent toujours un haut niveau de précision.



CONFIGURATION REQUISE POUR AURAL SCAN

Recommandée :

- Windows 11 64-Bit
- CPU Quad Core i5
- 8 Go de RAM
- Port USB 3.0
- Disque dur avec environ 80 Go d'espace libre
- Carte graphique avec 2 Go de RAM

■ CALIBRATION 3D



Répondez aux exigences croissantes de la gestion de la qualité grâce à la fonction de calibration 3D du logiciel de numérisation aural Scan.

Pour les exigences les plus élevées, telles que la gestion de la qualité, smart optics recommande la calibration 3D (en option), pour laquelle un objet de calibration 3D spécial est requis (disponible en tant qu'accessoire optionnel). Le processus exhaustif calibre le capteur, les axes et les calculs de maillage. Après une validation, aural Scan crée un journal de test qui documente la précision actuelle.

Une vidéo de la smart optics University explique comment utiliser la calibration 3D et où obtenir les journaux.



Souhaitez-vous en savoir plus sur la calibration 3D ? Notre équipe commerciale se fera un plaisir de vous aider.



PRÉCISION

LA PRÉCISION EST NOTRE POINT FORT

L'attention au détail, l'ingénierie allemande, la qualité et la précision ne sont pas des concepts vides de sens pour smart optics, mais constituent la base de la société et font du fabricant de scanners 3D une entreprise avec du cœur et de l'esprit.

L'entreprise de taille moyenne a posé sa première pierre à Bochum en 1997 et a toujours ses racines dans le domaine de la technologie de mesure. Les premiers scanners sont entrés en production en série dans les années 2000 et depuis lors, la société basée à Bochum n'a cessé de développer, produire et élargir son portefeuille de produits.

Chez smart optics, tous les secteurs de l'entreprise sont réunis sous un même toit, garantissant la fluidité des processus. Les scanners 3D fabriqués en Allemagne sont une référence internationale et



LE POUVOIR MENTAL

ET LES PENSÉES À L'AVENIR

Nos produits se sont solidement implantés dans les secteurs dentaire et audiolgique ainsi que dans l'industrie électronique en raison de leur performance et de leur qualité. Notre longue expérience et l'échange constant avec nos clients nous aident à développer et à améliorer nos produits de manière orientée vers le client, la qualité et l'avenir.

Répondre aux exigences spécifiques des clients et trouver de nouvelles solutions innovantes sont notre défi quotidien et font donc partie de notre compétence principale. Nous nous concentrons sur la mise en œuvre rapide et ciblée des projets en étroite collaboration avec nos clients et partenaires de développement.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

Pour nous, l'accent est mis sur les personnes - nos clients ainsi que nos employés. Sans l'engagement de nos employés, grandir et réussir sur le marché serait une chose impossible d'accomplir.

EN BREF

 FONDÉE EN 1997

 BOCHUM | ALLEMAGNE

 > 60 EMPLOYÉS

 > 2 000* SCANNERS DENTAIRES
> 1 000* SCANNERS AUDIOLOGIE (* PAR AN)

 DEPUIS 2020 BOUTIQUE EN
LIGNE UE

 > 100 REVENDEURS INTERNATIONAUX

NOUS VOUS CONSEILLONS TRÈS PRÉCISÉMENT

Si vous le souhaitez, vous pouvez recevoir des conseils détaillés sur nos produits : sur place, par téléphone ou sur l'Internet. La consultation consiste principalement à définir le bon objectif en fonction de vos besoins. Améliorez la performance de votre entreprise avec nos solutions.

NOUS LE PRENONS TRÈS AU SÉRIEUX

NOS SERVICES

- Solutions OEM et standard
- Formation produit pour nos revendeurs dans les domaines ventes et support technique
- Planification de projets à long terme
- Respect de normes de qualité élevées dans la production et le développement
- Assistance aux autorisations de mise au marché pour les marchés cibles de nos clients
- Développement de processus logistiques complexes

■ PLUS SUR SMART OPTICS



Trouver des tutoriels, lire des nouvelles ou commander des scanners, c'est très simple chez nous !



Vous souhaitez plus d'informations sur un produit ? Aucun problème. Dans la smart optics University vous pouvez regarder des tutoriels sur aural Scan et les scans en temps réel des scanners audiologie.



Tutoriels
smartoptics.de/aso



Sur le site web, vous recevrez des nouvelles concernant les produits et la société. Si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez vous inscrire à la newsletter de smart optics et ainsi recevoir des notes de version, des infos sur des événements, et plus encore.



Actualités
smartoptics.de/aove




Newsletter
smartoptics.de/en/newsletter/



Dans notre boutique en ligne, vous pouvez facilement commander des scanners et des logiciels. Votre avantage : Au moment des actions commerciales, la remise est automatiquement déduite dans la boutique en ligne.



Commander
smartoptics.de/ashe

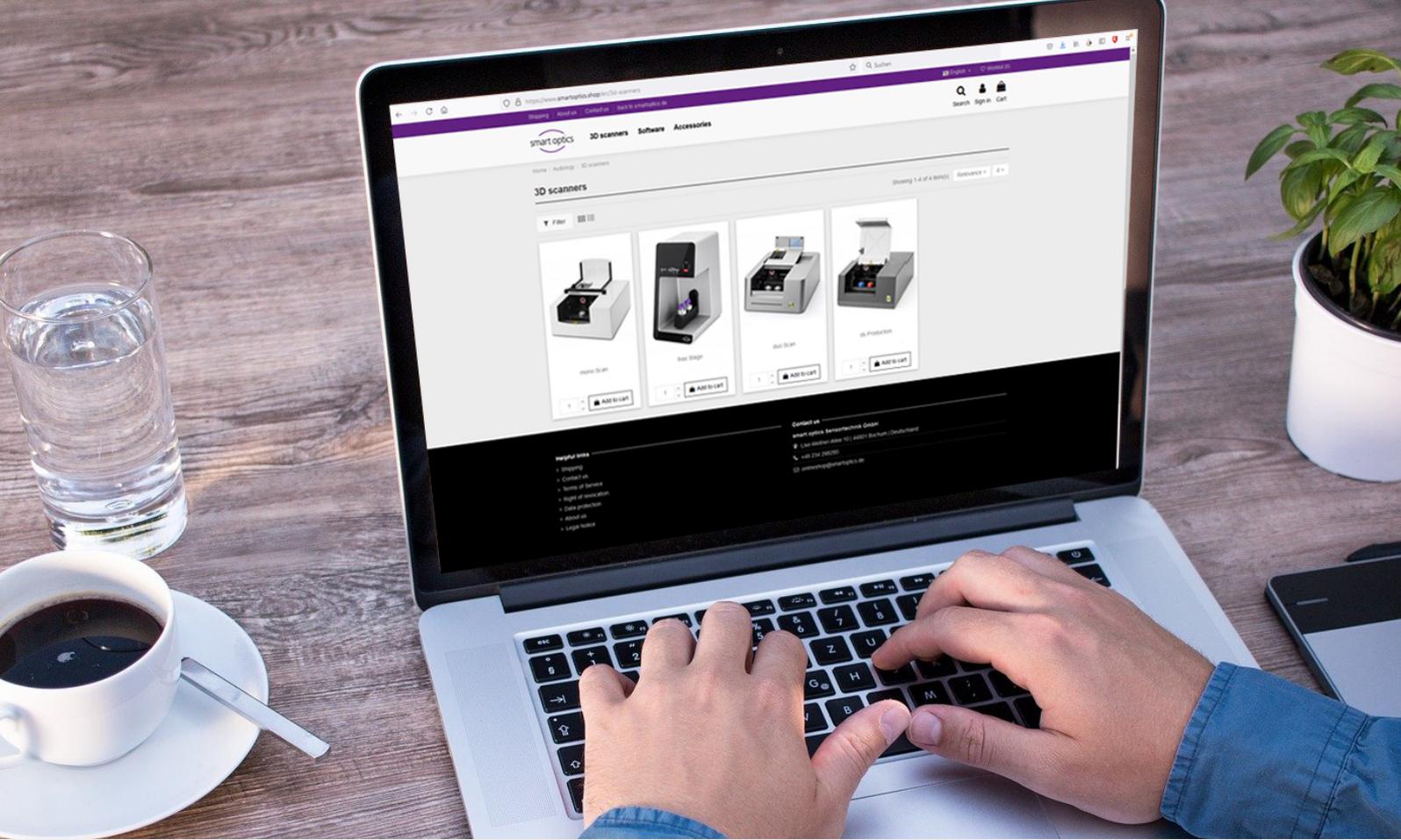

NOTES



smart optics Sensortechnik GmbH
Lise-Meitner-Allee 10
44801 Bochum, Allemagne



+49 (0) 234 29 828 0



+49 (0) 234 29 828 20



info@smartoptics.de



www.smartoptics.de



/smartopticsDE